


Rollator Carbon

BJ 04/2020 - 11/2021



Rehab GmbH Hertistrasse 29 8304 Wallisellen 044 821 67 57 rehab@rehabgmbh www.rehabgmbh.ch


Rahmen & Bremsen Übersicht Einheiten

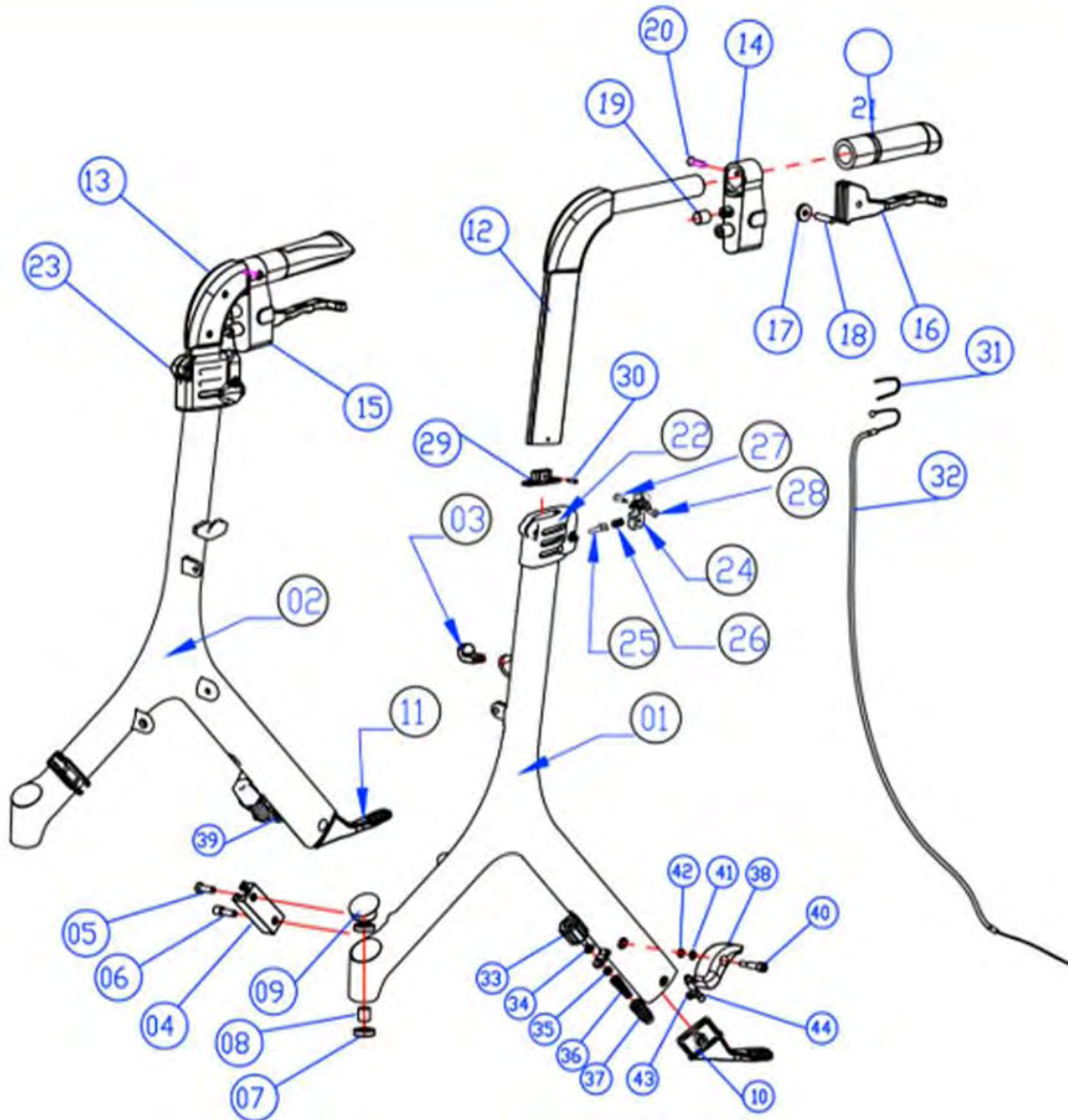

- 01 - Rahmenteil Carbon Grösse S links Art. Nr. CA-1000L
- 01 - Rahmenteil Carbon Grösse M – L links Art. Nr. CA-1000L-ML
- 02 - Rahmenteil Carbon Grösse S links Art. Nr. CA-1000R
- 02 - Rahmenteil Carbon Grösse M – L links Art. Nr. CA-1000R-ML
- 03 - Auflagengummis (2 Stück) Art. Nr. SPR-11
- 04 - CA SP Halter der Netztasche am Rahmen (2 Stück) Art. Nr. SPR-5411
- 07 - Kugellager 6001 2Rs / ZZ 12x28x8 mm Art. Nr. KL-6001
- 09 - CA Abdeckkappen Castorbuchse (silber) (2 Stück) Art. Nr. CA-1160
- 10 - Ankipphilfe Spring/ Carbon links Kunststoff ab 01/2019 Art. Nr. CA-17L
- 11 - Ankipphilfe Spring/ Carbon rechts Kunststoff ab 01/2019 Art. Nr. CA-17R
- 12 - Schiebegriffeinheit Carbon S links Art. Nr. CA-1201L
- 12 - Schiebegriffeinheit Carbon M links Art. Nr. CA-1202L
- 12 - Schiebegriffeinheit Carbon L links Art. Nr. CA-1203L
- 13 - Schiebegriffeinheit Carbon S rechts Art. Nr. CA-1201R
- 13 - Schiebegriffeinheit Carbon M rechts Art. Nr. CA-1202R

- 13 - Schiebegriffeinheit Carbon L rechts **Art. Nr. CA-1203R**
- 14 - Bremsgriffgehäuse links **Art. Nr. SPR-32L**
(verwendbar mit Spring / Spring XL / Spring CC / Carbon ab 04/2020)
- 15 - Bremsgriffgehäuse links **Art. Nr. SPR-32R**
(verwendbar mit Spring / Spring XL / Spring CC / Carbon ab 04/2020)
- 16 - CA Bremshebel für links und rechts einsetzbar **Art. Nr. CA-1210**
- 21 - Schiebegriffgummis (2 Stück) **Art. Nr. SPR-31**
- 22 - Höheneinstellung Schiebegriff links (inklusive 24,25,26,27,28) **Art. Nr. CA-1220**
- 23 - Höheneinstellung Schiebegriff rechts (inklusive 24,25,26,27,28) **Art. Nr. CA-1220**
- 32 - Bremszughülle wählbar für Größe S / M / L **Art. Nr. SPR-32-60**
- 32 - Bremsinnenzug Rollator 120mm Größe S/ M/ L **Art. Nr. SPR-90**
- 33 - Einstellschraube Bremse inkl. Spannfeder und Faltenbalg **Art. Nr. CA-1140**
- 38 - Messerbremse links (inklusive 40 und 42) **Art. Nr. CA-1152L**
- 39 - Messerbremse rechts (inklusive 40 und 42) **Art. Nr. CA-1152R**
- 43 - Halteschraube Bremszug **Art. Nr. CA-1151**


Kreuzstrebe Übersicht Einheiten

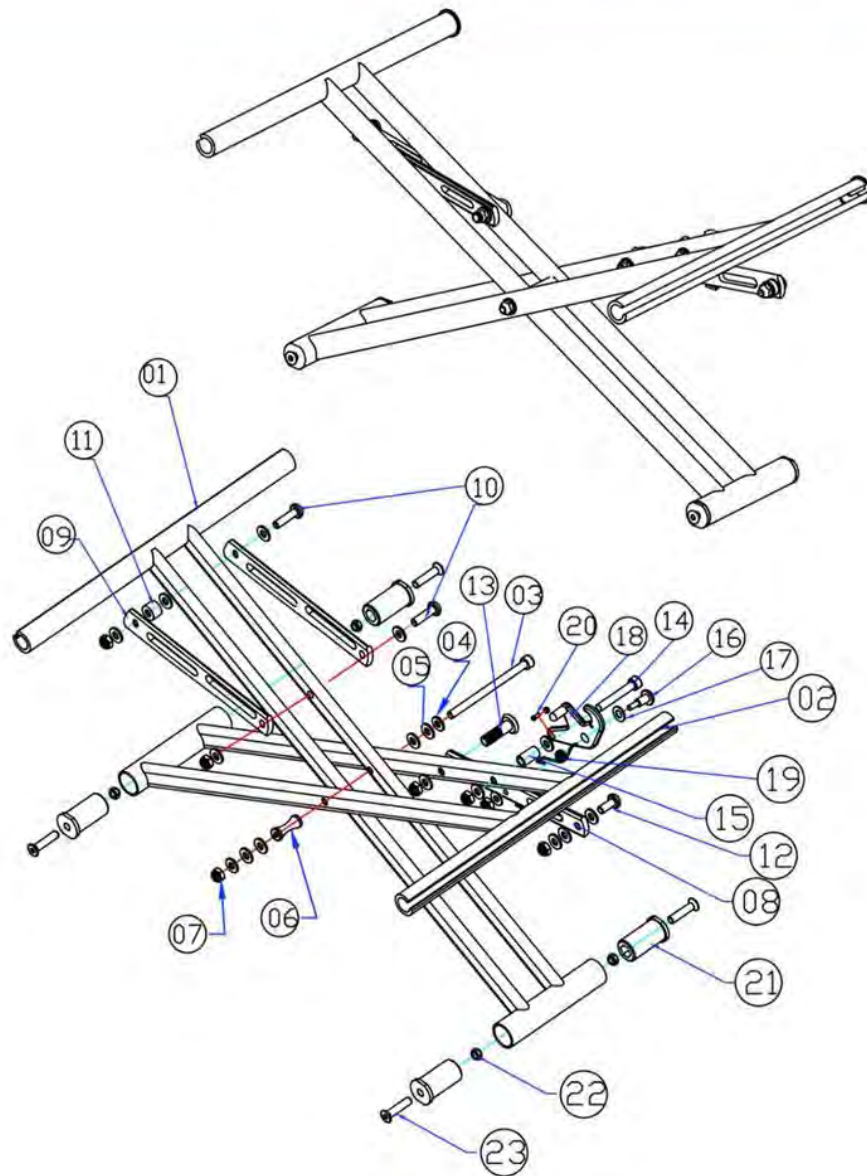

Kreuzstrebe


- 18 - Sicherverschluss, Unterlegscheibe, Feder und Schraube für Entriegelungscharnier
- (inklusive 14, 15, 16, 17, 19, 20) **Art. Nr. CA-1400**
- 21/ 22/ 23 Verschraubung Kreuzstrebe-Rahmen, bestehend aus: **Art. Nr. 80-10012-0**
- 1xSchraube, 1x Hülse und 1xMutter verwendbar mit Spring / Spring XL / Spring CC / Carbon
- 24 - Kreuzstrebe komplett wählbar für Grösse S **Nr. CA-1100S**
- 24 - Kreuzstrebe komplett wählbar für Grösse M/L **Art. Nr. CA-1100M**

Vorderrad Übersicht Einheiten

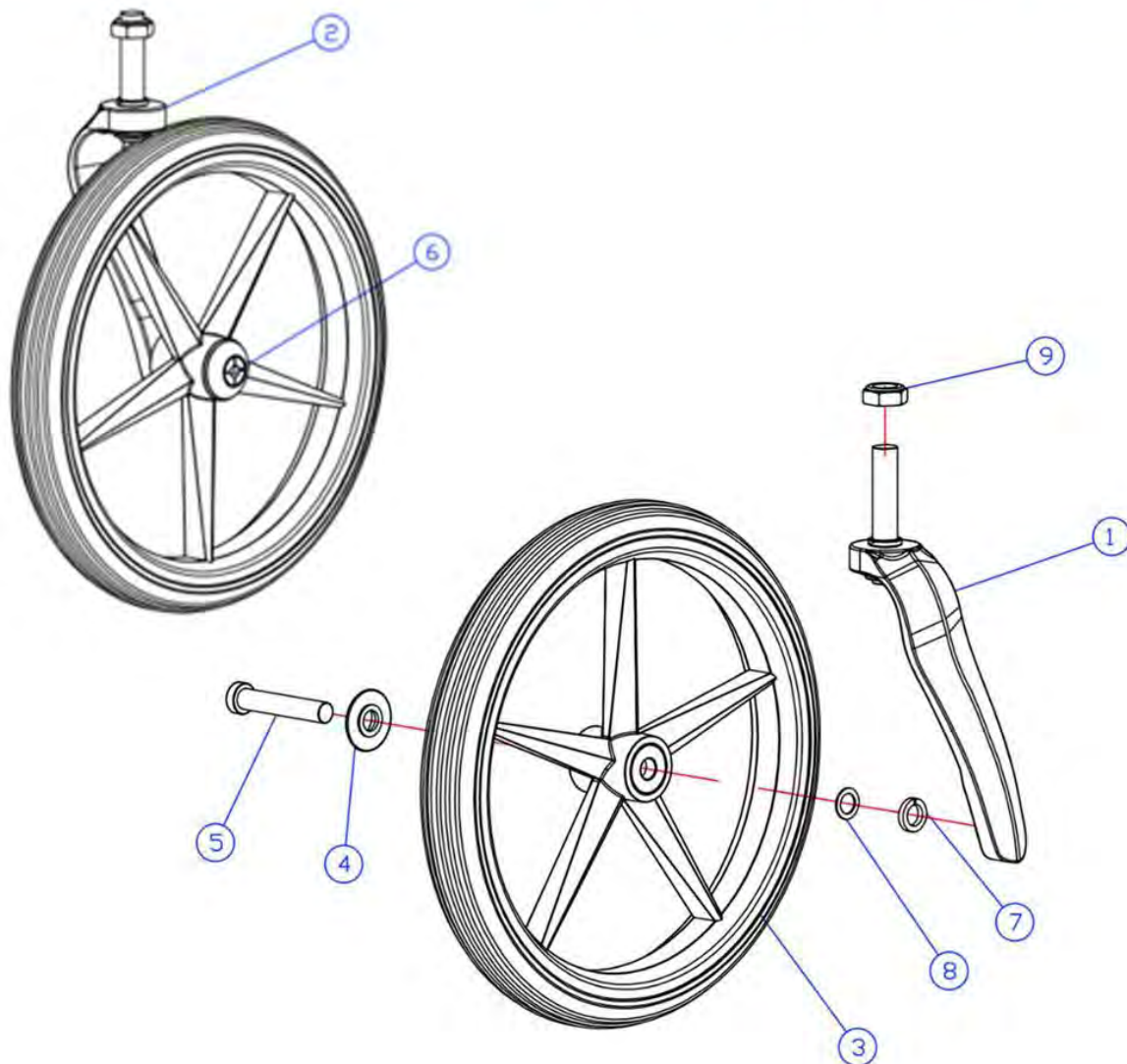


- 01 - Vorderradgabel links, inkl. Abdeckring, Achsbolzen **Rechtsgewinde**, Sicherungsring, Unterlegscheibe, Sicherungsmutter (inkl. 1, 4, 5, 7, 8) **Art. Nr. CA-1245L**
- 02 - Vorderradgabel rechts, inkl. Abdeckring, Achsbolzen **Linksgewinde**, Sicherungsring, Unterlegscheibe, Sicherungsmutter (inkl. 2, 4, 6, 7, 8) **ACHTUNG: Linksgewinde!**
- **Art. Nr. CA-1245R**
- 03 - Vorderrad für Carbon/ Spring/ Spring XL, 5-Stern Design 245mm, rechts und links verwendbar **Art. Nr. CA-46V**
- 10 - Kugellager 6901 2RS, 10x24x6 mm passend für Vorderräder Carbon/ Spring/ Spring XL **Art. Nr. KL-6901B**
- 11 - Distanzhülse für Kugellager Vorderrad Spring / Spring XL / Carbon **Art. Nr. RE-1001**

Hinterrad Übersicht Einheiten

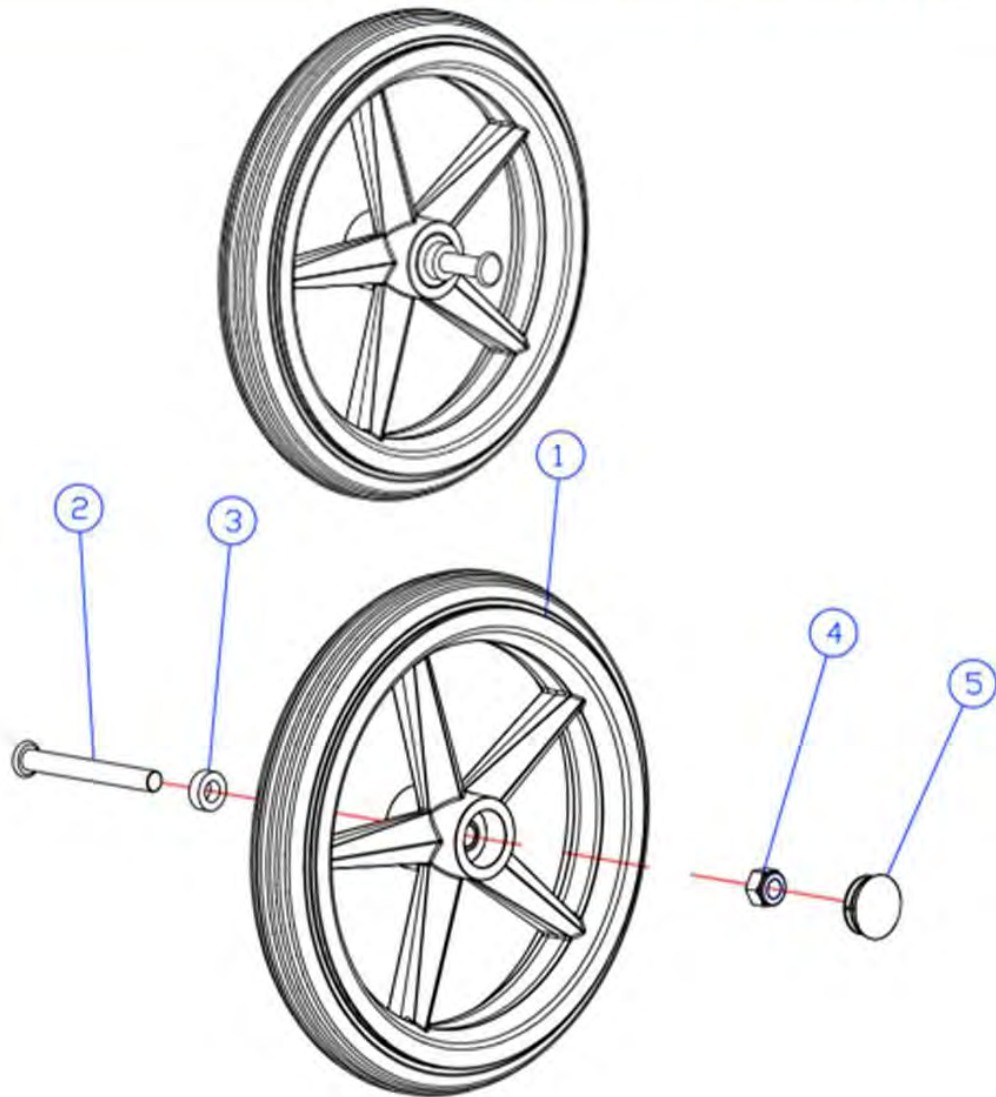

- 01 - Hinterrad $\varnothing 200 \times 34$ mm beidseitig 5-Stern Design rechts und links verwendbar [Art. Nr. CA-46H](#)
- 06 - Kugellager 608 2RS / ZZ, 8x22x7 mm passend für Radlager Hinterrad
Carbon/ Spring/ Spring XL [Art. Nr. KL-608](#)
- 07 - Distanzhülse für Kugellager Hinterrad verwendbar mit Spring / Spring XL / Carbon [Art. Nr. 66-1019](#)

Zubehör & Anbauteile Übersicht Einheiten

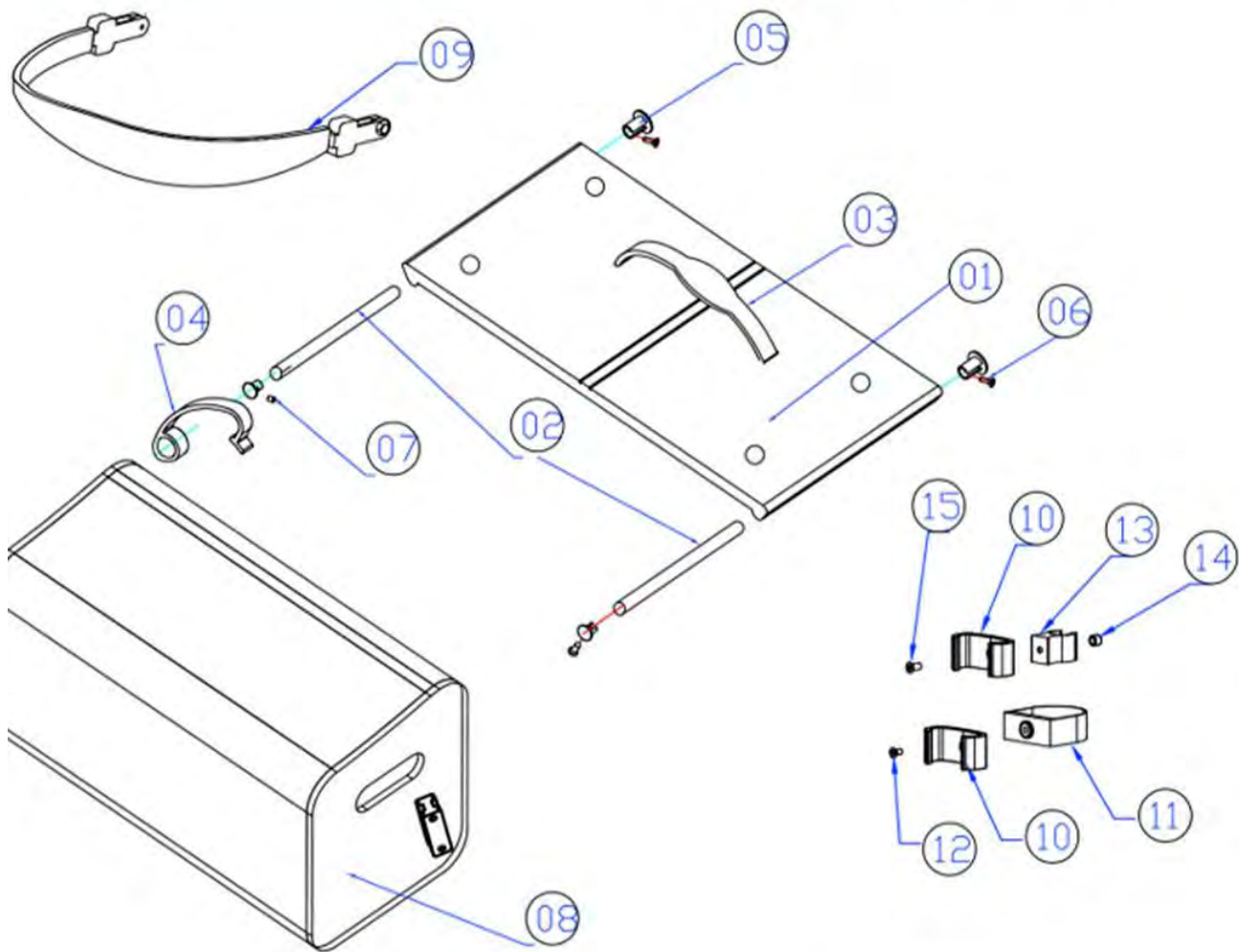

- 01 - Sitzgurt Carbon **Art. Nr. CFR-2**
- 03 - Faltschlaufe Sitzgurt Carbon S/M **Art. Nr. SPR-52-52**
- 03 - Faltschlaufe Sitzgurt Carbon L **Art. Nr. SPR-52-60**
- 04 - Haltebügel Rot **Art. Nr. SPR-22**
- 05 - Abdeckkappen Kreuzstrebe mit Reflektor 4 Stück (Schrauben nicht enthalten) **Art. Nr. CA-24**
- 08 - Netztasche für Carbon/ Spring **SPR-54**
- 09 - Rückengurt inkl. 2 Schrauben **SPR-55**
- 09 - CA SP Drehknopf für Rückengurt (Schaube M6 x 25) (2 Stück) **SPR-56**
- 10 - Stockhalter für Rollator Spring/ Carbon Oberteil + Unterteil **SPR-17**