



**DE** Bewusstsein und Atmung überprüfen  
**EN** Check for consciousness and breathing  
**FR** Vérifier la conscience et la respiration




**DE** Notruf absetzen  
**EN** Make an emergency call  
**FR** Contactez les secours

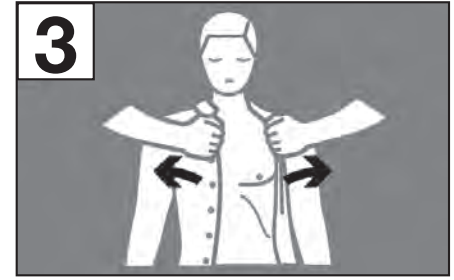


**DE** Oberkörper freimachen  
**EN** Expose the upper body  
**FR** Dégager le haut du corps

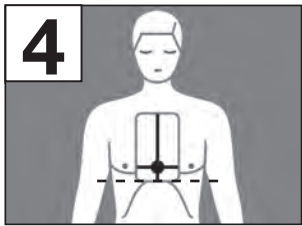


**DE** LifePad® auflegen  
**EN** Place the LifePad®  
**FR** Appliquer le LifePad®

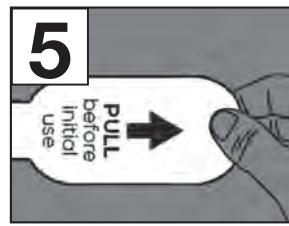

**DE** Batteriestreifen herausziehen  
**EN** Pull out the battery strip  
**FR** Retirez la bande de batterie

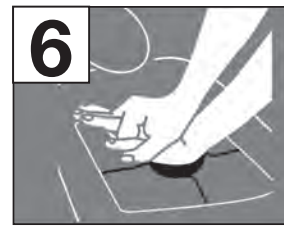

**DE** Hände auflegen  
**EN** Place your hands on the patient  
**FR** Posez les mains

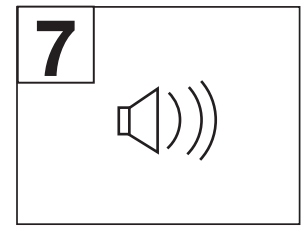


**DE** Piepsen = Drücken  
**EN** Beep = push  
**FR** Bips = appuyer




**DE** **Kompressionen durchführen**  
 LED's zeigen an wenn genügend Druck ausgeübt wird (nacheinander leuchten alle LED's von orange nach grün).  
**EN** **Perform the compressions**  
 LEDs indicate when sufficient pressure is applied (all LEDs light up one after the other from orange to green).  
**FR** **Réalisation de compressions**  
 Les LED s'allument lorsque la pression est suffisante (toutes les LED sont allumées l'une après l'autre de l'orange au vert).



**DE** **Brustkorb wieder entlasten**  
 Hier hilft das LED-Feedbacksystem.  
 Wenn Sie dafür ausgebildet sind, können Sie nach 30 Kompressionen 2 Beatmungen durchführen.  
**EN** **Release the chest again**  
 The LED feedback system helps here.  
 If you are trained to do so, you can give 2 rescue breaths after 30 compressions.  
**FR** **Relâchement de la cage thoracique**  
 Le système de rétroaction LED vous aide pour cela.  
 Si vous y êtes formé, vous pouvez pratiquer 2 ventilations artificielles après 30 compressions.

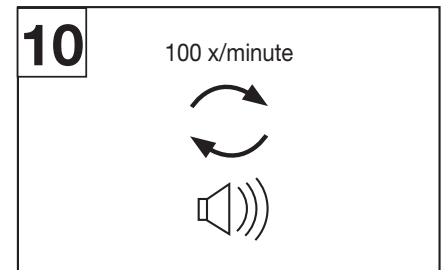


**DE** Im Rhythmus des Signaltons Schritte **8** und **9** wiederholen, um eine Frequenz von 100 Kompressionen/Min. zu gewährleisten.  
 Das Gerät besitzt keine EKG-Funktion.  
**Führen Sie die Herzdruckmassage durch, bis wieder deutliche Lebenszeichen wahrnehmbar sind oder der Notarzt übernimmt.**  
**EN** Repeat steps **8** and **9** in rhythm with the acoustic signal to ensure a frequency of 100 compressions/min.  
 The device does not have an ECG function.  
**Perform cardiac massage until there are clear signs of life again or until the emergency doctor takes over.**  
**FR** Répéter les étapes **8** et **9** au rythme du signal sonore pour obtenir une fréquence de 100 compressions par minute.  
 L'appareil dispose d'une fonction ECG.  
**Continuez le massage cardiaque jusqu'à ce que vous constatiez à nouveau des signes de vie évidents ou que les secours prennent le relais.**

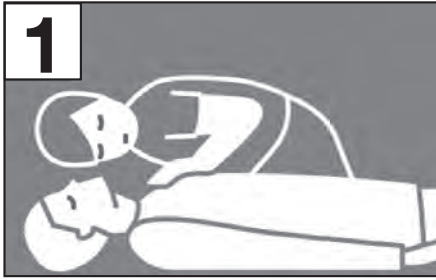


- ES** Comprobar la consciencia y la respiración  
**IT** Controllare coscienza e respirazione  
**TR** Bilincin ve nefes alıp vermenin kontrol edilmesi




- ES** Llame al número de emergencias  
**IT** Effettuare una chiamata di emergenza  
**TR** Acil durum bildirimini yapılması

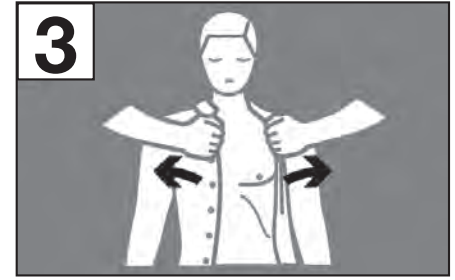


- ES** Desvestir el tórax  
**IT** Denuotare la parte superiore del corpo  
**TR** Üst gövdedeki giysinin çıkarılması

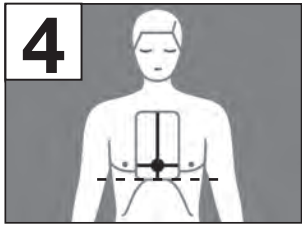


- ES** Aplicación del LifePad®  
**IT** Posizionare il LifePad®  
**TR** LifePad® cihazının yerleştirilmesi

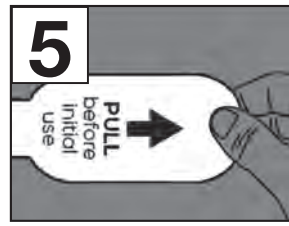

- ES** Retirar la tira de pila  
**IT** Estrarre la linguetta della batteria  
**TR** PİL şeridinin dışarı çekilmesi

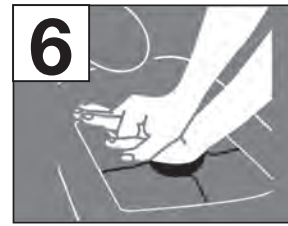

- ES** Colocación de las manos  
**IT** Posizionare le mani  
**TR** Ellerin yerleştirilmesi

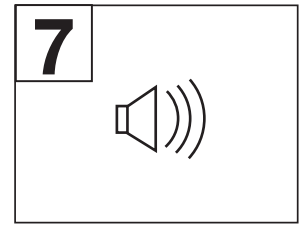

- ES** Pitido = compresión  
**IT** Segnale acustico = compressione  
**TR** Bip sesi = Bastırın



- ES** Realización de las compresiones  
 Los LED indican que se está aplicando suficiente presión (todos los LED se encienden sucesivamente de naranja a verde).

- IT** Eseguire le compressioni  
 I LED indicano quando viene esercitata una pressione sufficiente (si illuminano tutti in sequenza dall'arancione al verde).

- TR** Kompresyonların uygulanması  
 LED'ler yeterli basınç uygulanıp uygulanmadığını gösterir (turuncu yanan LED'ler birbiri ardına yeşil yanmaya başlar).



- ES** Volver a descomprimir la caja torácica  
 En este caso, será de ayuda el sistema de retroalimentación LED.


- Si está capacitado para hacerlo, puede administrar 2 respiraciones de rescate después de 30 compresiones.

- IT** Rilasciare la cassa toracica  
 A questo scopo è utile il sistema di feedback a LED.

- Se sei addestrato, puoi eseguire 2 respirazioni di soccorso dopo aver effettuato 30 compressioni.

- TR** Göğüs kafesinin tekrar serbest bırakılması  
 LED geri bildirim sistemi bu konuda yardımcı olur.

- Eğitiminiz varsa, 30 kez kompresyon uygulandıktan sonra 2 kez suni solunum yapabilirsiniz.

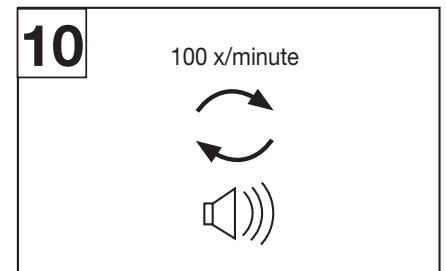

- ES** Repita los pasos [8] y [9] al ritmo de la señal acústica para garantizar una frecuencia de 100 compresiones/min.

El aparato no dispone de ninguna función de ECG.

**Realice el masaje cardíaco hasta que se perciban señales de vida claras o el médico de urgencias se haga cargo.**

- IT** Ripetere i passaggi [8] e [9] al ritmo del segnale acustico per garantire una frequenza di 100 compressioni/min.

L'apparecchio non è dotato di funzione ECG.

**Eseguire il massaggio cardiaco fino a quando non si avvertano di nuovo chiari segni di vita o fino all'arrivo di un medico di pronto intervento.**

- TR** Dakikada 100 kompresyon sağlamak için [8] ve [9] adımı sinyal sesinin ritmiyle uyumlu bir şekilde tekrarlayın.

Cihazda EKG fonksiyonu yoktur.

**Yaşamsal durumda net bir düzelme olana veya acil tıp teknisyeni müdahale edene kadar kalp masajı uygulayın.**