

Die Community Maske, die passt

Hey cool, dass du dich für eine Community Maske von Petertools entschieden hast. Unsere Masken entstehen durch flinke Hände im schönen Kanton Bern, aus feinsten Stoffen aus dem lauschigen Appenzell und der weltweit innovativsten antimikrobiellen Beschichtung aus dem umtriebigen Zürich. Einzig das elastische Faserband kommt aus einer Seilerei in Dornbirn. Fertig genäht und verpackt werden die Masken von den fleissigen Frauen der Justizvollzugsanstalt Hindelbank und die Mitarbeitenden der Stiftung Dammweg unterstützen uns, wo sie können.

Unsere Maske zeichnet sich durch einige Besonderheiten aus

1. Sie schont die Umwelt, sie ist **Oekotex® Standard 100** zertifiziert.
2. Die verarbeiteten Stoffe sind mit der antimikrobiellen Beschichtung **HeiQ Viroblock®** behandelt, diese Beschichtung schützt das behandelte Produkt vor Mikroben und Keimen und zersetzt deren Lipid-Hülle.
3. Sie lässt sich mit dem einseitig vernähten elastischen Faserband sehr einfach auf die **gewünschte Grösse einstellen**, zudem ist es schön weich.
4. Sie ist **Brillenträger-freundlich** da sie an der Nase hoch geschnitten ist und so das Beschlagen der Gläser minimiert.
5. Die Passgenauigkeit erleichtert das **einhandige Anziehen**.

Innenseite

Mischgewebe aus 61% Baumwolle und 39% Lyocell für erhöhte Saugfähigkeit, dies verhindert die schnelle Durchfeuchtung.

Aussenseite

100% Baumwollgewebe, bei den weiss/weissen Masken zusätzlich mit wasserabweisender (hydrophober) Ausrüstung (Spraytest 80 nach EN DIN ISO 4920:2012).

Maskentyp

Diese Community Maske ist keine Atemschutzmaske (FFP1, FFP2 oder FFP3) gemäss der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und auch keine medizinische Gesichtsmaske gemäss der Medizinproduktverordnung 93/42/EWG oder der Verordnung (EU) 2017 / 745. Diese textile Maske, bietet einen ausreichenden Schutz gegen Flüssigkeitströpfchen unterschiedlicher Grösse, die beim Husten oder Niesen entstehen, sowie gegen Aerosole (Partikel bis zu 1 Mm).

Gebrauchsanweisung

1. Vor Erstgebrauch bei 60° mit Flüssig-Vollwaschmittel waschen.
2. Regelmässig bei 60° mit Flüssig-Vollwaschmittel waschen.
3. Die antimikrobielle Eigenschaft bleibt 30 Waschgänge erhalten.
4. Vor dem Entsorgen waschen und der Textilsammlung zuführen.

Anpassen der Maske

Stell die Passgenauigkeit mit den elastischen Faserbändern ein, so passt die Maske perfekt und schneidet bei langem Tragen nicht ein. Deine Ohren werden es dir danken.

HeiQ Viroblock: Diese Technologie schützt das Produkt vor Mikroben und Keimen und zersetzt deren Lipid-Hülle. Enthält ein Biozid* auf Basis von recyceltem Silbersalz. *Wirkstoff: Reaktionsmasse von Titandioxid und Silberchlorid.

Cette technologie de tissu protège le produit des microbes et des germes et décompose leurs coquilles lipidiques. Contient un biocide* à base de sel d'argent recyclé. *Ingrédient actif : masse réactionnelle du dioxyde de titane et du chlorure d'argent.

Mit dem Kauf dieser Maske unterstützt du die Stiftung




Avec l'achat de ce masque, vous soutenez la fondation

Für Fragen zum Produkt oder der Anwendung wende dich an:
info@petertools.life


Drei mögliche Befestigungsarten

Mit elastischem Faserband hinter den Ohren
Nicht benötigte Laschen ev. abschneiden

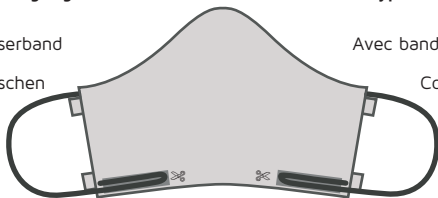

Länge einstellbar mit Klett, überstehendes Band ev. abschneiden

Mit elastischem Band gekreuzt hinter dem Kopf
Avec bande élastique traversée derrière la tête

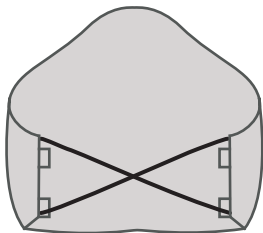


Trois types de fixation possibles

Avec bande élastique en fibre derrière les oreilles
Couper les languettes non utilisées

Longueur réglable par velcro, couper le ruban adhésif qui dépasse si nécessaire

Mit Baumwollband verknotet hinter dem Kopf
Noué avec une bande de coton derrière la tête

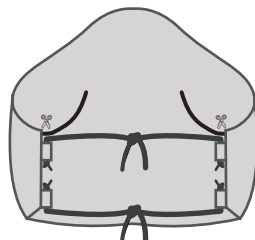

Bandes disponibles dans la cyberboutique
Bänder erhältlich im Online-Shop
petertools.life

